

# “泰爾茂” 塑膠注射筒 “Terumo” Syringe

衛署醫器輸字第 007518 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

## TERUMO 注射筒

材質符合功能需要

TERUMO 注射筒由特殊高透明度的塑化材質 (Polypropylene) 製成，計測藥量，辨識氣泡，觀察血液回流，迅速簡單。

橡膠柱塞精密度高

非活化性的柱塞，具有優異的耐藥性。特殊一體成型，精密度高，進出注射筒腔內的推拉操作，滑順正確。

設計特殊精緻，確保雙手舒適  
大凸緣與凹入的拴塞軸心，精緻設計，抓緊針筒的動作，正確舒適。在不平的接觸面上，凸緣可以防止滾動。

規格齊全

備有八種規格：0.5cc, 1cc, 2.5cc, 5cc, 10cc, 20cc, 30cc, 50cc，配合不同需要，可以選擇最合適的規格，不會因無適用規格而採購較大規格的針筒。

特殊刻度印刷

粗厚、特殊的黑色刻度，耐髒、耐磨、辨識清楚。

## NEOLUS 皮下注射針

NEOLUS 皮下注射針

銳利的針頭與高品質的 NEOLUS 向您及您的患者保證最正確，快速又舒適的注射。

採用高品質的鋼材，精緻研磨工程，完全的潤滑，與無時無刻的監視檢查系統，確保您所要求的完美品質。

透明的針頭底座

針頭底座的顏色，容易辨識規格。透明度高，血液回流確認快速。低死角設計的 25G, 26G, 27G，能減少氣泡、節省藥量。高科技的整體投入生產品質優異的製品完全自動化的製造過程，避免因不經意而發生失誤或污染。TV監視器，微電腦處理機，機械人，自動化的設備與生產機器相結合，自動控制品質，每一個零件能完美地達到高技術水準。自動化的設備自動節除有瑕疵的製成品，並調整機器，不再生產不良零件。

清潔衛生的生產區，無菌室，設備新穎的

實驗室，機械人等高科技的整體投入，是創造品質、生產優秀產品的最佳保證。

## 警告

●打開單品包裝後請立即使用。使用後以適當的安全方式廢棄，以消除感染風險。

●取用時應小心避免針刺。使用後勿套回針頭套。

注意事項

●使用電子束滅菌。不得重新滅菌或再使用。  
●如果單品包裝或產品有所損壞或污染時請勿使用。

●不得用於顯影劑的高壓注射。

●請勿儲存於極端的溫度和濕度中。避免日光直射。

有效期限 五年。

Product code of Terumo Syringe with needle (Sterilized by EB)	
SS*01TE2516	
SS*01TE25259	
SS*01TE2613	
SS*01TE2713	
SS*02LE2138	
SS*02LE2238	
SS*02LE2325	
SS*02LE2332	
SS*02LE2425	
SS*02SE2238	
SS*02SE2325	
SS*02SE2332	
SS*02SE2425	
SS*05LE2138	
SS*05LE2238	
SS*05LE2332	
SS*05SE2138	
SS*05SE2238	
SS*05SE2332	
SS*10LE2125	
SS*10LE2138	
SS*10LE2238	
SS*10SE2138	

型號編碼說明			
位數	指示項目	內	容
1-2	品名	SS：注射筒	
3	販賣地	*：輸出用 -：日本	
4-5	容量	01：1 mL 02：2.5 mL 05：5 mL 10：10 mL	
6	Tip的種類	T：Slip tip for tuberculin use S：Slip tip L：Round lock tip	
7	滅菌法	E：Electron beam sterilization	
8-9	針的種類	Cannula gauge	
10-11		Cannula length	
12	其他	9：外包裝盒印有中文標籤	

Product code of Terumo Syringe (Sterilized by EB)	
SS*01TE	
SS*02LE1	
SS*02SE	
SS*05LE1	
SS*05SE	
SS*10ESE	
SS*10LE1	
SS*10SE	
SS*20ESE	
SS*20ESE1	
SS*30ESE1	
SS*30LE1	
SS*50ESE	
SS*50LE	
SS*50CE	

型號編碼說明			
位數	指示項目	內	容
1-2	品名	SS：注射筒	
3	販賣地	*：輸出用 -：日本	
4-5	容量	01：1 mL 02：2.5 mL 05：5 mL 10：10 mL 20：20 mL 30：30 mL 50：50 mL	
6-7	Tip	T：Slip tip for tuberculin use S：Slip tip L：Round lock tip ES：Eccentric slip tip C：Catheter tip	
8	滅菌法	E：Electron beam sterilization	
9	其他	1：CE 標誌	

總公司名稱：Terumo Corporation

總公司地址：44-1,2-Chome, Hatagaya, Shibuya-Ku, Tokyo 151, Japan

製造業者名稱：Kofu Factory of Terumo Corporation

製造業者地址：1727-1, Tsuijjarai, Showa-cho, Nakakoma-gun, Yamanashi Prefecture, Japan

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：臺北市中正區忠孝西路一段4號8樓