

“泰爾茂” 紗爾續靜脈留置針

“Terumo” Surflash

許可字號：衛署醫器輸字第009217號

禁忌症：如未來將要進行磁振照影(MRI)時，則禁止使用本產品。

警告：如果單一包裝已破損時，則請勿使用。請勿試圖將半抽出或完全抽出的針頭重新插入。由於兒科病人（和成年病人相比），較易對於某些處置所伴隨的生理壓力產生強烈反應，當本器材用於孩童時，應採取適當的預警措施。導管應依照CDC規範或機構政策進行更換，對所有病人應監控其一般性預警。

1. 進行靜脈穿刺。
2. 藉由血液沖回到回沖室及導管本身，以確認針頭和導管適當插入靜脈。
3. 握住回沖室不動，只前進導管進入靜脈中。
4. 握住有色輪轂不動，抽回針頭並安全地予以丟棄。
5. 將其接上投藥套組，並牢牢固定。
6. 依據生物危險物棄置的當地規範及機構規定，安全丟棄所有污染物質。

放射線不透光性、非熱原性、請勿存放於極端溫濕度環境下。

		導 管			針	
型 號	針頭規格	長 度	外 徑	內 徑	針頭規格	針
SR*FF2419	24	19mm(3/4")	0.67mm	0.47mm	27	purple
SR*FF2225	22	25mm(1")	0.85mm	0.60mm	24	black
SR*FF2032	20	32mm(1 1/4")	1.10mm	0.80mm	22	yellow
SR*FF2051	20	51mm(2")	1.10mm	0.80mm	22	yellow
SR*FF1832	18	32mm(1 1/4")	1.30mm	0.95mm	20	pink
SR*FF1851	18	51mm(2")	1.30mm	0.95mm	20	pink
SR*FF1864	18	64mm(2 1/2")	1.30mm	0.95mm	20	pink
SR*FF1651	16	51mm(2")	1.70mm	1.30mm	18	white
SR*FF1664	16	64mm(2 1/2")	1.70mm	1.30mm	18	white
SR*FF1451	14	51mm(2")	2.17mm	1.73mm	16	yell/grn
SR*FF1464	14	64mm(2 1/2")	2.17mm	1.73mm	16	yell/grn

製造業者名稱：Kofu Factory of Terumo Corporation

製造業者地址：1727-1, Tsuijirai, showa-cho, Nakakoma-gun, Yamanashi Prefecture, Japan

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：臺北市中正區忠孝西路一段4號8樓